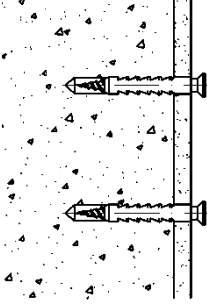
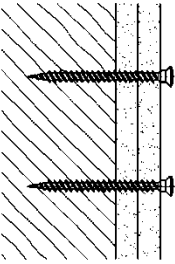
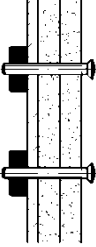
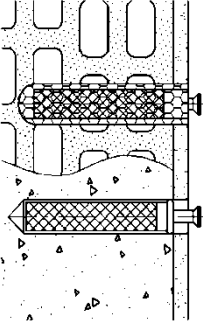
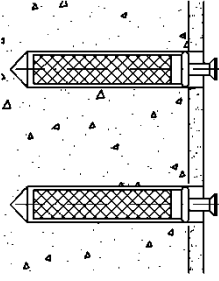


Lehnen Funktion – Unverbindliche Empfehlung zur Befestigung

Zur Befestigung an Wänden aus:






	Haltegriff und Duschhandlauf	Stütz- und Klappgriff	Duschsitz
 <p>Beton (≥B25) Im Lieferumfang enthalten</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Linsenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25</p> <p><u>LBE10001</u> – 6 Befestigungspunkte (Halte- und Winkelgriff) <u>LBE10002</u> – 8 Befestigungspunkte (Duschhandlauf) <u>LBE10003</u> – 10 Befestigungspunkte (Duschhandlauf) <u>LBE10004</u> – 11 Befestigungspunkte (Duschhandlauf)</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Linsenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25</p> <p><u>LBE10006</u> – 6 Befestigungspunkte</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Linsenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25 <u>LBE10006</u> – 6 Befestigungspunkte (Duschsitz)</p> <p>Kunststoffdübel S8 x 40, Linsenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25 <u>LBE10005</u> – 12 Befestigungspunkte (Duschsitz mit Rückenlehne)</p>
 <p>Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Hartholzplatten oder Schichtholzplatten mit mindestens 25 mm Stärke – zum Beispiel Tragständer der Vorwandinstallations-Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25 (Duschsitz)</p> <p>Linsenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25 (Duschsitz mit Rückenlehne)</p>
 <p>Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten – zum Beispiel Tragständer der Vorwandinstallations-Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 60 DIN 966 (Duschsitz) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 60 DIN 966 (Duschsitz mit Rückenlehne)</p>
 <p>mit Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hohlblockstein ▪ Kalksandlochstein ▪ Hochlochziegel ▪ andere Lochsteine <p>ohne Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beton ▪ Vollziegel ▪ Kalksandvollstein 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 (Duschsitz) M5 x 30 DIN 966 (Duschsitz mit Rückenlehne) mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollstein aus Leichtbeton ▪ Porenbeton ▪ Vollgipsziegel 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 (Duschsitz) M5 x 30 DIN 966 (Duschsitz mit Rückenlehne) mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>

Lehen Evolution – Unverbindliche Empfehlung zur Befestigung

Zur Befestigung an Wänden aus:	Haltegriff und Duschhandlauf	Stütz- und Klappgriff	Duschsitz
<p>Beton (≥B25) Im Lieferumfang enthalten</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Senkkopfschraube 6 x 60 DIN 7997 TX25 <u>LBE30001</u> – 4 Befestigungspunkte (Halte- und Winkelgriff) <u>LBE30002</u> – 6 Befestigungspunkte (Duschhandlauf) <u>LBE30003</u> – 8 Befestigungspunkte (Duschhandlauf mit Brausestange)</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S10 x 50, Senkkopfschraube 8 x 80 DIN 7997 TX-40 <u>LBE30004</u> - 6 Befestigungspunkte</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S14 x 75, Sechskant-Holzschraube 10 x 100 DIN 571 <u>LBE30005</u> - 4 Befestigungspunkte</p>
<p>Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Hartholzplatten oder Schichtholzplatten von mindestens 25 mm Stärke. Zum Beispiel Tragständer der Vorwandinstallations-Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Senkkopfschrauben 6 x 60 DIN 7997 TX25</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Kunststoffdübel S10 x 50, Senkkopfschraube 8 x 80 DIN 7997 TX40</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Kunststoffdübel S14 x 75, Sechskant-Holzschraube 10 x 100 DIN 571</p>
<p>Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten – zum Beispiel Tragständer der Vorwandinstallations-Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Sechskantschrauben M10 x 60 DIN 933</p>
<p>mit Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> Hohlblockstein Kalksandlochstein Hochlochziegel andere Lochsteine <p>ohne Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> Beton Vollziegel Kalksandvollstein 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Sechskantschrauben M10 x 30 DIN 933 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>
<ul style="list-style-type: none"> Vollstein aus Leichtbeton Porenbeton Vollgipsziegel 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Linsensschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen) Sechskantschrauben M10 x 30 DIN 933 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>

Lehnen Concept Pro – Unverbindliche Empfehlung zur Befestigung

Zur Befestigung an Wänden aus:

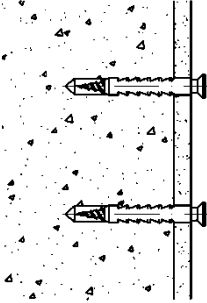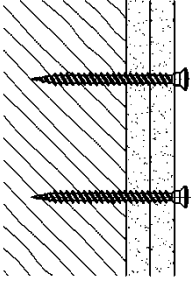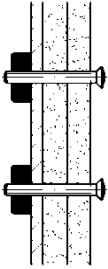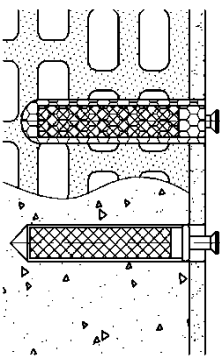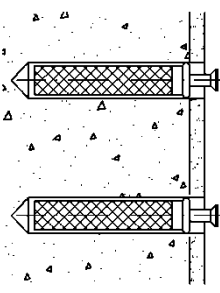	Haltegriff und Duschhandlauf	Stütz- und Klappgriff	Duschsitz
 <p>Beton (≥B25) Im Lieferumfang enthalten</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Linsensenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25</p> <p>LBE60001 – 6 Befestigungs- punkte (Halte- und Winkel- griff) LBE60002 – 8 Befestigungs- punkte (Duschhandlauf)</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S8 x 40, Linsensenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25</p> <p>LBE60003 – 6 Befestigungs- punkte</p>	<p>Befestigungsmaterial (Im Lieferumfang enthalten) Kunststoffdübel S10 x 50, Linsensenkopf Holzschraube 8 x 60 DIN 7995 TX30</p> <p>LBE60004 – 6 Befestigungs- punkte</p>
 <p>Zur Befestigung an Leicht- bauwänden mit Hinter- füterung aus Hartholzplatten oder Schichtholzplatten mit mindestens 25 mm Stärke – zum Beispiel Tragständer der Vorwandinstallations- Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsensenkopf Holzschraube 5 x 60 TX25</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsensenkopf Holzschraube 6 x 60 DIN 7995 TX25</p>	<p>Empfehlung: (Im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Linsensenkopf Holzschraube 8 x 60 DIN 7995 TX30</p>
 <p>Zur Befestigung an Leicht- bauwänden mit integrierten Stahlplatten – zum Beispiel Tragständer der Vorwandin- stallations-Hersteller.</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 60 DIN 966</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 60 DIN 966</p>
 <p>mit Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hohlblockstein ▪ Kalksandlochstein ▪ Hochlochziegel ▪ andere Lochsteine <p>ohne Siebhülse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beton ▪ Vollziegel ▪ Kalksandvollstein 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 30 DIN 966 mit/ohne Siebhülse + Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollstein aus Leichtbeton ▪ Porenbeton ▪ Vollgipsziegel 	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>	<p>Empfehlung: (Bauseits zu stellen)</p> <p>Linsensenschrauben mit Kreuzschlitz M8 x 30 DIN 966 mit Ankerhülse + Injektionsmörtel</p>