



Allgemeine Pflegehinweise

Lehnen Produkte sind wegen ihrer glatten Oberfläche leicht zu pflegen und zu reinigen. In der Regel genügt zur Reinigung ein gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch.

Möchten Sie dennoch nicht auf Reinigungsmittel, oder auf Desinfektionsmittel im Rahmen der prophylaktischen Routinedesinfektion in medizinischen Einrichtungen, Heimen, öffentlichen Bereichen, sowie in anderen Bereichen verzichten, sollten Sie folgendes beachten:

Reinigung

Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 8 und 9 im Konzentrat. Bezüglich Konzentration und Einwirkzeit der Reinigungsmittel beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Besonders bewährt haben sich Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen und Tenside enthalten.

Desinfektion (Flächendesinfektion)

Verwenden Sie ausschließlich Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 8 und 9 im Konzentrat. Bezüglich Konzentration und Einwirkzeit der Desinfektionsmittel beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Besonders bewährt haben sich Desinfektionsmittel auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

Verwenden Sie keine alkalischen, aldehyd-, phenol-, eisen-, säure- und chlorhaltige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Auch Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz, Entkalker sowie scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden.

Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollte das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel restlos entfernt werden. Von Vorteil sind nicht stark eingefärbte und nicht stark rückstandsbildende Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Die Oberfläche der Lehnen Produkte kann bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Wir empfehlen bei der Auswahl von Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln eine darauf spezialisierte Fachfirma hinzuzuziehen.